

Ivostar® | Gnathostar®


Carta de moldes de dentes



ivoclar

ANTERIORES SUPERIORES

Ivostar®

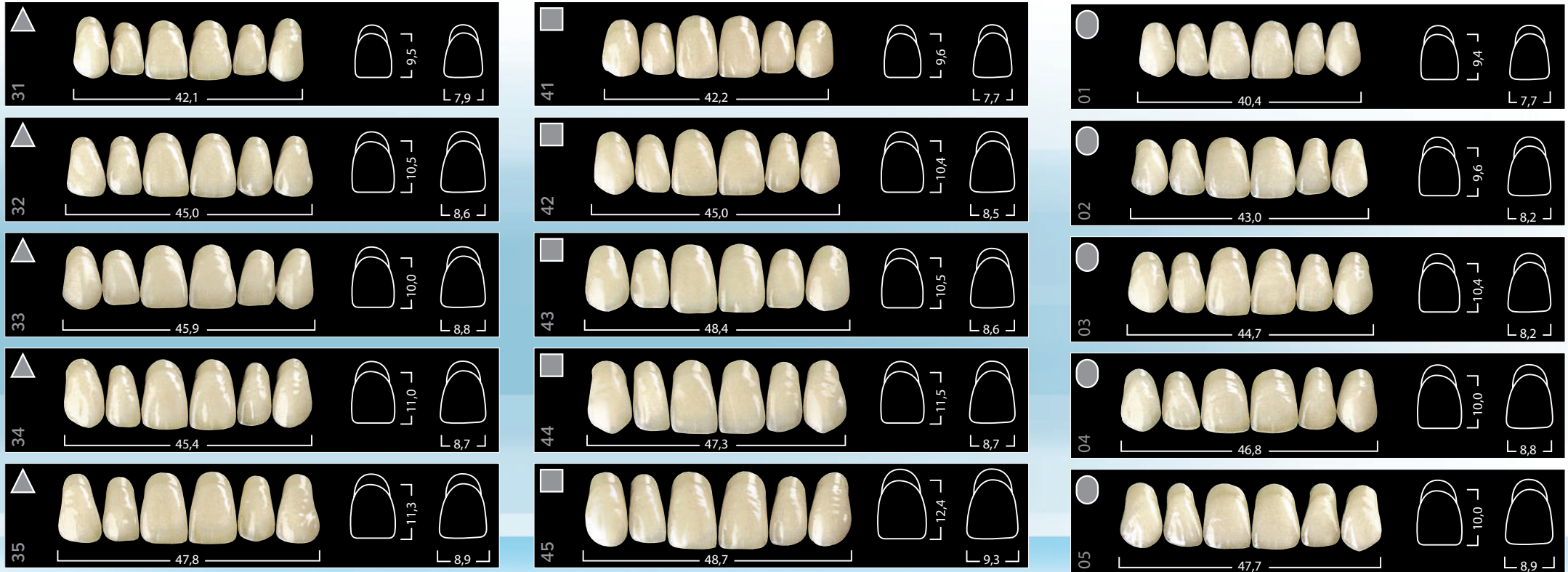

Formas

Os dentes anteriores Ivostar, que tem 3 camadas, estão disponíveis em 15 formas superiores e 6 formas inferiores. Os dentes posteriores Gnathostar, de 2 camadas, são apresentados em 5 formas superiores e 5 formas inferiores. Além disso, os dentes anteriores são fabricados em três formas: triangular, quadrada e ovalada.

Estratificação

Estratificação especial permite que os dentes Ivostar | Gnathostar apresentem aparência semelhante aos dentes naturais.

INFERIORES

Ivostar®



POSTERIORES

Gnathostar®

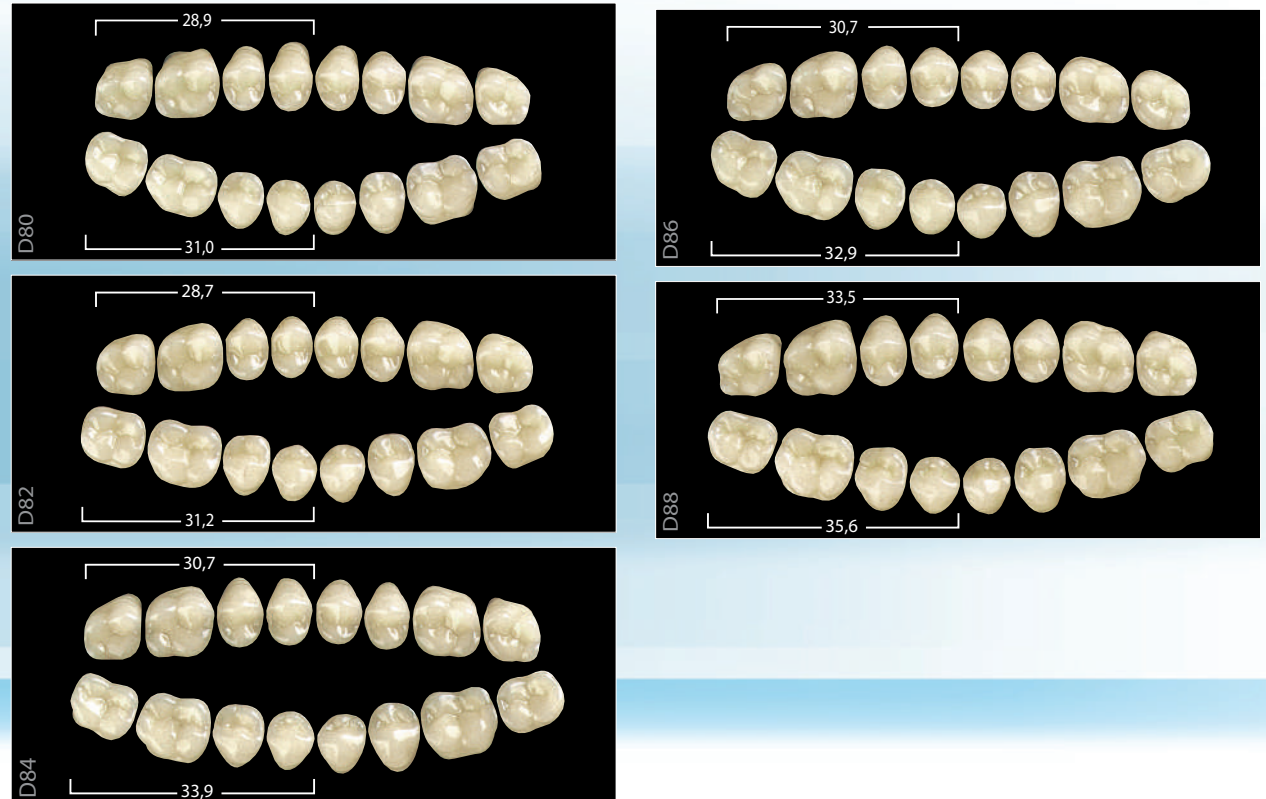


TABELA DE COMBINAÇÕES

Formas Superiores Inferiores Posteriores

▲	31	13 14	D80 D82 D86
	32	15 11	D88 D84
	33	11 15	D84
	34	15 14	D84 D88
	35	16 15	D88 D84
■	41	14	D80 D86
	42	15	D84 D88
	43	16	D88
	44	14 15	D88
	45	16	D88
●	01	12 13	D80 D82
	02	12 13	D80 D82
	03	15 11	D84
	04	11 15	D84
	05	11 15	D84 D88

Disponível nas cores A-D: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 e C3

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Numerosos métodos são empregados para a seleção de dentes baseados em critérios como: o formato da cabeça e do corpo, e as características masculinas ou femininas. Quando nenhuma informação está disponível a respeito do tamanho, forma ou da posição dos dentes, alguns pontos de referência podem ser obtidos a partir da configuração da maxila. Das inúmeras formas maxilares identificáveis, podem ser deduzidos três tipos básicos:

- Quadrada
- Triangular
- Ovalada

Estas três formas são usadas para agrupar os dentes Ivoclar Vivadent de acordo com suas características anatômicas.

A seleção dos dentes Ivoclar Vivadent anteriores e inferiores é conseguida com



Formas triangulares

31, 32, 33, 34, 35.
Estes grupos de dentes são caracterizados por dentes com coroas estreitas que afilam no sentido cervical. A curvatura gêngivo-incisal é pronunciada. O incisivo central tem forma ligeiramente triangular. A crista marginal também apresenta contorno triangular, basicamente indicado para os casos de articulação cruzada.



Formas quadradas

41, 42, 43, 44, 45.
Nestas formas quadradas, predomina o incisivo central. A curvatura gêngivo-incisal é moderada. O contorno da crista marginal é nitidamente quadrado, basicamente indicado para os casos de articulação normal.



Formas ovais

01, 02, 03, 04, 05.
Estes grupos são caracterizados por curvatura gêngivo-incisal muito pronunciada. O contorno oval da crista marginal está indicado para os casos de articulação baixa (sobremordida profunda).



©/ivoclar | ○/ivoclar.br

✉/mbrmarketing@ivoclar.com | ☎/(11) 2424-7400

🌐/www.ivoclar.com.br | 📝/blog.ivoclar.com/lab/pt